

การส่งตรวจทางพยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ส่วนปลาย

Muscle and Nerve Biopsy

ขั้นตอนการรับชิ้นเนื้อ โดยเจ้าหน้าที่จากห้องผ่าตัด หรือญาติคนไข้นำส่ง หรือ RFS

1. ห้องผ่าตัดเมื่อทำการนัดคนไข้เรียบร้อยแล้ว โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิและแลปพิเศษ (1249) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. รับนัด โดยได้รับโทรศัพท์แจ้งจาก เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ และบันทึกการรับนัดบนกระดาน white board
3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับคนไข้, ญาติคนไข้ นำชิ้นเนื้อมาส่งที่พยาธิศัลยกรรมภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมใบนำส่งชิ้นเนื้อ พร้อมเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งประวัติและการตรวจรักษาให้ชัดเจน
4. รับชิ้นเนื้อ โดยดูชื่อ ที่ขูดให้ตรงกับใบนำส่งชิ้นเนื้อ
5. ชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อที่ได้รับ ควรมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร และหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อที่นำส่ง ขอให้วางบนผ้าก๊อชที่วางรองพื้นไว้ในถุงซิปล็อคหรือภาชนะเก็บตัวอย่าง โดยไม่ต้องแช่น้ำยาใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ที่ห้องแลปลงสมุดบันทึกการรับชิ้นเนื้อ ชื่อคนไข้ เวลา และการเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อทำเป็นบล็อกชิ้นเนื้อตาม เทคนิคพิเศษ (snap frozen technique) ตามวันที่ ที่รับชิ้นเนื้อ
7. เขียนเบอร์และ marker ลงบนสไลด์ตามแต่ละวัน เพื่อรอการตัด Frozen section
8. เขียนใบนำส่งสไลด์ตาม marker ที่ข้อม
9. ตรวจเช็คสไลด์อีกครั้งว่าตรงตาม number และ marker ตามที่แพทย์สั่ง
10. ส่งมอบงานให้แพทย์